

CARL ZEISS
JENA



ZEISS

Binokulares

HORNHAUTMIKROSKOP

Unser binokulares HORNHAUTMIKROSKOP

leistet dem Augenarzt wertvolle Dienste bei Untersuchungen des Auges und bei operativen Eingriffen. Es vereinigt die Vorzüge großer Sehfelder und weiter Arbeitsabstände mit den bekannten Vorteilen der binokular-stereoskopischen Beobachtung. Man erhält mit diesem Gerät aufrechte und eindrucksvolle Bilder von hervorragender Plastik.

Die zu erzielenden Vergrößerungen gehen aus nachstehender Aufstellung hervor:

Doppelobjektiv	Okulare				Mittlerer Arbeitsabstand mm
	6,3 ×	10 ×	16 ×	25 ×	
	Gesamtvergrößerung <i>Sehfelddurchmesser in mm</i>				
1,0	6,3× 28	10× 20	16× 12	25× 8	125
2,5	16× 11	25× 7,9	40× 4,7	63× 3,2	70

Für die Grundausrüstung sind neben den Doppelobjektiven 1,0 und 2,5 die Okularpaare 10× und 16× vorgesehen.

Die schwenkbare Leuchte mit Zwerglampe 6V 5W ermöglicht, den vorderen Augenabschnitt von der günstigsten Seite zu beleuchten. Das Sehfeld des binokularen Hornhautmikroskops ist in jedem Fall voll ausgeleuchtet.


Alle Bedienungsgriffe sind so zusammengefaßt, daß das Gerät bequem betätigt werden kann. Eine Hand stellt das binokulare Hornhautmikroskop mit der Triebsschraube ein und schwenkt die Leuchte, die andere bedient den Hebel am Kreuztisch und die nahebei liegende Höheneinstellung.

Instrumententisch, Kinn- und Stirnstütze vervollständigen die Ausrüstung.

Für Untersuchungen des vorderen und des hinteren Augenabschnittes bei fokaler Spaltbeleuchtung wird das binokulare Hornhautmikroskop mit dem Spaltleuchtengerät angewendet (s. Druckschrift CZ 60-038-1).

Die Bilder sind nicht in allen Einzelheiten für die Ausführung der Geräte maßgebend.

CARL ZEISS
JENA

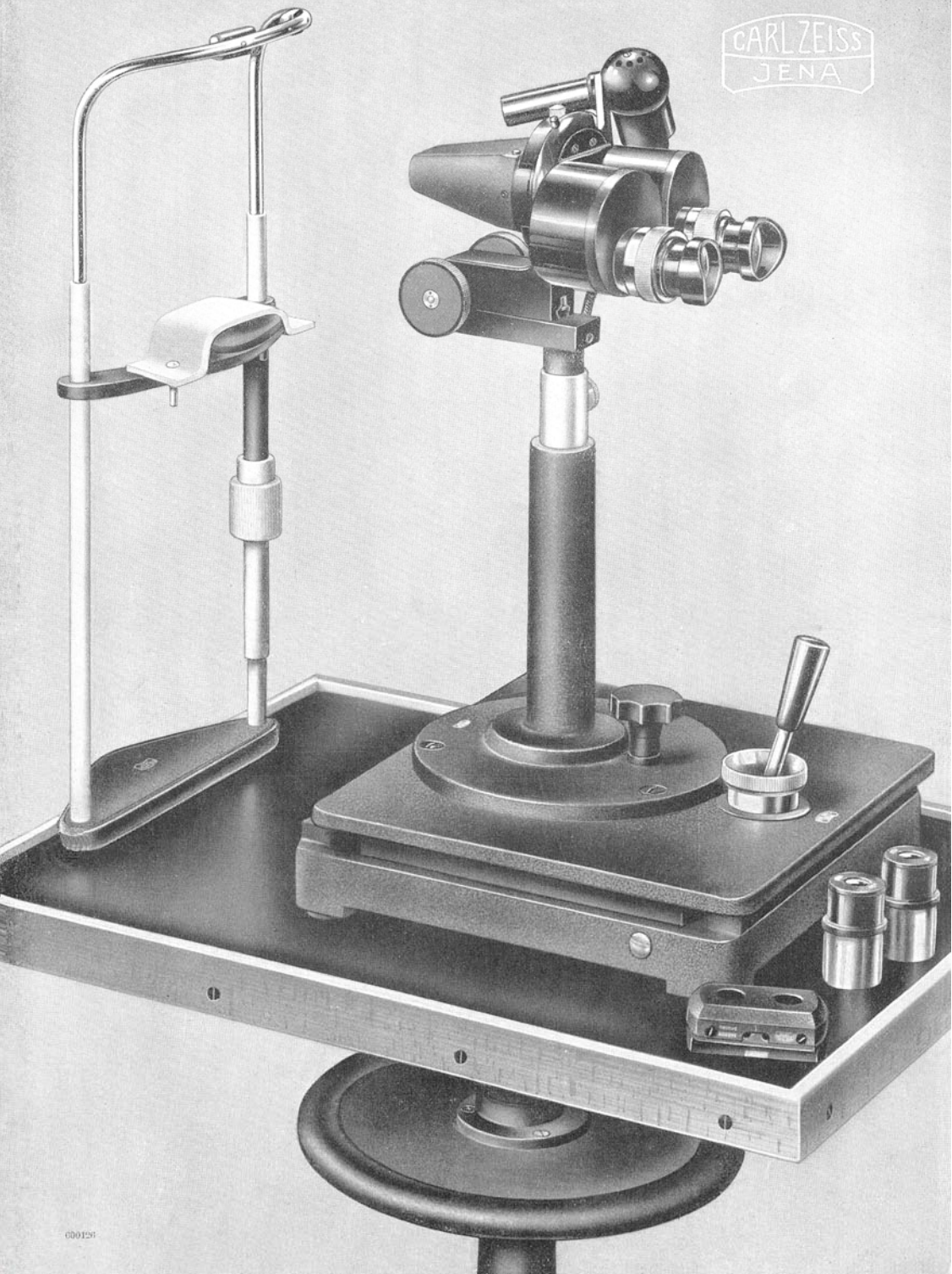

Bestellliste

Benennung	Gewicht kg	Bestell- nummer	Bestell- wort
Binokulares Hornhautmikroskop bestehend aus:			
Binokularem, bildaufrichtendem Doppeltubus mit geradem Einblick, verstellbarem Triebkasten, Doppelobjektiven 1,0 und 2,5, Okularpaaren 10× und 16×, 2 aufsteckbaren Augenmuscheln 1 sowie schwenkbarer Leuchte mit Zuleitung und Stecker.....	5,200	60 01 10 A	<i>Vaduv</i>
3 Zwerglampen F6V 5W (2 Stück)	0,010	5453 ZN 54	<i>Vadxy</i>
Hochstellung.....	1,810	60 80 50	<i>Vadij</i>
Kreuztisch.....	5,120	60 81 30	<i>Vadkl</i>
Binokulares Hornhautmikroskop in vorstehender Ausrüstung für Vergröße-	12,140	60 01 14	<i>Vadza</i>
Zur Ergänzung			
Instrumententisch mit Schublade, Kleinspannungs-Transformator 5VA 220/6V, Schalter und Zuleitung.....	21,000	60 81 15	<i>Vamul</i>
Kinn- und Stirnstütze.....	2,600	60 81 53	<i>Vadrs</i>
100 Papierauflagen zur Kinnstütze.....	0,020	60 81 54	<i>Vadtu</i>
Binokulares Hornhautmikroskop gebrauchsfertig zum Anschluß an Wechselstrom 220V.....	35,760	60 01 12	<i>Vamtk</i>
Doppelobjektiv 1,0.....	0,150	30 24 01	<i>Kyceo</i>
Doppelobjektiv 2,5.....	0,200	30 24 02	<i>Kyomk</i>
2 Okulare 6,3×.....	0,150	30 31 50	<i>Kymkk</i>
2 Okulare 10×.....	0,150	30 31 51	<i>Kybuf</i>
2 Okulare 16×.....	0,150	30 31 52	<i>Kyonl</i>
2 Okulare 25×.....	0,150	30 31 53	<i>Kycak</i>
2 aufsteckbare Augenmuscheln 1.....	0,030	30 86 35	<i>Kyous</i>
Handauflage zur Stirnstütze beim Fremdkörperentfernen.....	0,100	60 81 70	<i>Vanja</i>
Hauchschutz zur Kinnstütze.....	0,030	60 81 73	<i>Vankb</i>
Instrumententisch.....	20,000	60 81 11	<i>Vadap</i>
Kleinspannungs-Transformator 5VA 220 6 ZN 5090.....	0,560	—	<i>Vadyz</i>

Die Beleuchtungseinrichtung ist zum Anschluß an Wechselstrom 220V vorgesehen.
Bei abweichender Netzspannung und Stromart bitte Sonderangebot anfordern!

V E B C A R L Z E I S S J E N A

Abteilung für ophthalmologische Geräte

Drahtwort: Zeisswerk Jena

Fernsprecher 3541

Druckschriften-Nr. CZ 60-035 b-1

Waren-Nr. 3731 31 13

TPRT-Nr. 11017/52

XI.54.V. V/10/13-2-A300/54/DDR